



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز پزشکی فانم (عج)
کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی

دستورالعمل شستشو و ضدعفونی ظرف ادرار (یورین باتل)

- برای شستشو و ضدعفونی این ظروف استفاده از دستگاه شستشو و ضد عفونی کننده همراه با حرارت توصیه میشود.
- ظروف ادراری که با حرارت ضد عفونی نشده باشند، حتماً بایستی بعنوان ظرف آلوده تلقی گردند و دستها پس از تماس با آن حتماً شسته شود.
- در صورت عدم استفاده از روش ضدعفونی توسط حرارت، جهت بیماران مبتلا به عفونت ادراری بایستی از ظرف ادرار مجزا و با برچسب مشخص استفاده گردد و پس از زهر بار مصرف، با آب شستشو شده و فقط در اختیار همان بیمار قرارگیرد.
- پس از ترخیص بیمار ظرف مزبور بایستی با محلول هیپوکلریت ضد عفونی گردد.