



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز پزشکی قائم (عج)
کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی

دستورالعمل نگهداری و ضد عفونی لارینگوسکوپ

- در اکثر موارد شستشوی تیغه لارینگوسکوپ با یک شوینده، آبکشی و خشک کردن آن کافی است ولی اگر نیاز به ضد عفونی کردن باشد، ضد عفونی سازی با الکل ۷۰٪ و یا غوطه ور نمودن آن در گلو تار آلدیید برای مدت ۱۰ دقیقه و شستشو با آب کافی خواهد بود.